

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/kruuse-aplikator-do-latwego-podawania-tabletek-psa-kota-z-miekką-koncówką-1szt-p-4327.html>



KRUUSE Aplikator do łatwego podawania tabletek psa kota z miękką końcówką 1szt

Cena	10,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	570964
Kod producenta	273093
Kod EAN	5703188206282

Opis produktu

Aplikator Tabletek Psa Kota Miękką Końcówką Kruuse

Aplikator Tabletek Buster 1szt

Aplikator z miękką końcówką do podawania tabletek psu, kotu i innym małym zwierzętom, firmy KRUUSE.

Ten przyrząd z pewnością pomoże każdemu opiekunowi podać tabletkę swojemu psu, kotu lub innemu futerkowemu zwierzątku, dzięki czemu lek zostanie podany w całości, szybko i bezpiecznie.

Aplikator tabletek został zaprojektowany z myślą o zwierzętach, które niechętnie zażywają leki, czyli dla psów, kotów, fretek, królików a także większych gryzoni takich jak kawia domowa, świnka morska, szynszyla. **Koncówka aplikatora jest wąska oraz miękka** dzięki czemu nawet nie mając wprawy **bezpiecznie i skutecznie podamy leki** naszemu pupilowi.

Urządzenie zostało wyprodukowane przez renomowaną firmę KRUUSE, lidera w branży sprzętu weterynaryjnego.

Sposób użycia:

Urządzenie do podawania tabletek jest bardzo łatwe w użyciu. Całość przypomina strzykawkę zakończoną uchwytem. Lek możemy podać na sucho jak i również z wodą pitną bądź płynnym pokarmem. Jeśli chcemy podać lek na sucho należy lekko wyciągnąć tłok, zaaplikować tabletkę w przeznaczony do tego uchwyt. Następnie delikatnie wkładamy aplikator jak najgłębiej do pyska i szybko wciskamy tłok w celu aplikacji tabletki. Gdy zaś chcemy zaaplikować tabletkę wraz z "zachętą" należy umieścić końcówkę aplikatora w wodzie bądź płynnym pokarmie, pociągając tłok, dzięki któremu wewnątrz urządzenia napełni się. Następnie aplikujemy tabletkę i delikatnie wkładamy aplikator do pyska naciskając tłok, który sprawi, że w pysku naszego zwierzątka znajdzie się lek wraz ze smaczną przekąską lub wodą.

WAŻNE: Należy robić to ostrożnie by nasze zwierze nie zakrztusiło się. Gdy już tabletką została zaaplikowana należy przepłukać aplikator wodą i osuszyć.

Wymiary:

- długość całkowita: 14,5 - 17,5 cm
- szerokość w najszerszym miejscu: 6 cm
- grubość końcówki aplikatora: 1 cm

Aplikator posiada uchwyty na palce o średnicy ok. 2,5 cm - dzięki czemu osoba dorosła nie będzie miała problemów podczas użytkowania.

Kolor: zielony

Produkt został zatwierdzony przez weterynarzy.

- producent: KRUUSE